

Delyme

Limpeza interna de termodesinfectoras

Delyme é uma preparação desincrustante ácida. Seu uso regular promove a remoção de crostas e depósitos minerais alcalinos das partes internas de termodesinfectoras e equipamentos de aço inox.

Previne o acúmulo de resíduos provenientes da água mantendo as lavadoras livres de detritos prejudiciais ao seu perfeito desempenho.

O uso semanal ou mais frequente mantém a lavadora sem manchas e com superfícies brilhantes.

Composição: Ácido ortofosfórico, Ácido pentahidróxicapróico e Água.

MODO DE USAR

Indicações de uso EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS:

Sujidade ou incrustação média, manchas claras e/ou depósito alcalino:

1. Usar 4mL de DELYME® para cada litro de água;
2. Fazer um ciclo de, no mínimo, 10 minutos com água na temperatura de 45°C;
3. Enxaguar a câmara com água quente por no mínimo 10 minutos;
4. Se possível, descartar o produto por sistema de dispensação automática para evitar contato com o mesmo.

Sujidade pesada, manchas escuras com vestígio de depósitos antigos:

1. Usar 60mL de DELYME® para cada litro de água;
2. Fazer um ciclo de, no mínimo, 10 minutos com água na temperatura de 45°C;
3. Enxaguar a câmara com água quente por no mínimo 10 minutos;
4. Se possível, descartar o produto por sistema de dispensação automática para evitar contato com o mesmo.

Produto Registrado na ANVISA/MS nº 313810009