

# F\*A\*C\*T\*S®

## DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO ASSISTÊNCIA A SAÚDE

SISTEMA DE TRATAMENTO DE AUTOCLAVE  
PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL  
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO

**F\*A\*C\*T\*S®** remove toda ferrugem, manchas, corrosões e placas de depósitos alcalinos minerais das superfícies externas e internas de autoclave e de qualquer utensílio em AÇO INOX. É uma solução segura, eficiente e rápida em espuma, permanecendo mais tempo no local onde foi aplicado.

**F\*A\*C\*T\*S®** requer enxague simples e não deixa resíduos.

**F\*A\*C\*T\*S®** pode ser usado para qualquer utensílio em AÇO INOX.



### NÃO USE EM INSTRUMENTOS CROMADOS OU DE PRATA MODO DE USAR PARA LIMPEZA:

1. As superfícies da autoclave devem estar frias.
2. Aplique **F\*A\*C\*T\*S®** generosamente sobre as superfícies internas.
3. Mantenha as superfícies umedecidas com o produto durante 15 - 30 minutos.
4. Com uma escova não metálica vá escovando as superfícies, para agilizar o processo. Use luvas.
5. Enxágue as superfícies.

### MODO DE USAR PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS EM AÇO INOX:

1. Aplique **F\*A\*C\*T\*S®** generosamente sobre as superfícies em AÇO INOX.
2. Deixe agir por 15 - 30 minutos.
3. Escove com escova não metálica para agilizar o processo. USE LUVAS.
4. Enxágue com grande quantidade de água corrente. Repita o processo sempre que achar necessário. O uso regular do produto prolonga a vida útil das autoclaves e todos os equipamentos em AÇO INOX.

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO PELA ANVISA/MS Nº 25351.177572/2006-21