

Modo de uso:

- Siga os protocolos recomendados para a limpeza do endoscópio e/ou canulados;
- Após a limpeza, passe o Test® InstruSponge através do canal do endoscópio ou lúmen do artigo;
- Remover o Test® Swab do tubo. Colocar a ponta do Test® InstruSponge no tubo do Test® Swab.

A ponta deverá

ser cortada com uma tesoura estéril ou que tenha sido tratada com álcool 70%.

- Colocar o Test® Swab de volta ao tubo com a ponta do Test® InstruSponge.
- Com o polegar e o indicador, dobre o bulbo de frente para trás para romper a válvula e liberar o reagente.

Aperte o bulbo a fim de expelir todo o líquido pela haste do Test® Swab .

- Girar o tubo com movimentos para direita e esquerda por 05 segundos;
- Inserir o tubo do Test® Swab no ATP Complete Ruhof, fechar e apertar o botão OK;
- Em 15 segundos o dispositivo ATP Complete exibirá a quantidade de contaminação detectada.
- Descartar após o uso.

Obs.: A leitura deve ser realizada no máximo até 30 segundos após quebra do bulbo. Não realizar nova leitura com o mesmo Test® Swab .