

PREMIX®

CONCENTRADO



Premix® Concentrado é uma emulsão lubrificante inibidora de corrosão, levemente alcalina destinada a prevenção de ferrugem, manchas e enrijecimento do instrumental cirúrgico.

É um produto não oleoso não pegajoso e sem silicone.

Premix® Concentrado reduz o custo com a reparação e a reposição dos instrumentos. Recomenda-se o uso rotineiro, principalmente em zonas em que a água contenha altos teores de minerais (água salobra). O uso regular de Premix® Concentrado reduz os altos custos de reparação dos instrumentos, estendendo sua vida útil.

Premix® Concentrado proporciona maior rendimento, mais economia e praticidade, deixando uma película protetora na superfície do artigo. Ideal para lubrificação manual e automática.

Ele é permeável ao agente esterilizante, não causa sensibilização dérmica, não é citotóxico*.

USO MANUAL:

- Diluir 8mL de Premix concentrado para cada Litro de água;
- Mergulhe os instrumentos previamente limpos na solução, ou banhe-os completamente com o spray;
- Movimente as articulações para melhor penetração;
- Remova os instrumentos do banho e deixe escorrer por 30 segundos ;
- Envolva os Instrumentos já escorridos e esterilize;
- Usar o produto na diluição correta.

EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS:

- Coloque Premix concentrado diretamente no compartimento destinado aos produtos de limpeza;
- Diluir 3mL de Premix concentrado para cada Litro de água;
- Siga as recomendações do fabricante do equipamento.

NÃO ENXAGUE.

ATENÇÃO: Utilizado na diluição correta o produto não deixa resíduos nem aspecto gorduroso nos artigos.

CLASSE DE RISCO I
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA Nº 25351.227610/2005-12

*Característica comprovada por laboratório Internacional certificado ISO/IEC 17025:2005.