

Premix® CONCENTRADO

Lubrificante Mineral.

- O ÚNICO BIOCAMPATÍVEL
- MAIOR RENDIMENTO
- MAIS ECONÔMICO
- MAIS PRÁTICO
- IDEAL PARA LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS
DILUIÇÃO 2 mL/L

PREMIX® CONCENTRADO é uma emulsão lubrificante, inibidora de corrosão, destinada a prevenção de ferrugem, manchas e enrijecimento do instrumental cirúrgico, desenvolvido para uso em qualquer lavadora automática bem como para uso manual.

É um produto não oleoso, não pegajoso, atóxico e sem silicone. PREMIX® CONCENTRADO reduz o custo com a reparação e a reposição dos instrumentos.

Recomenda-se o uso rotineiro principalmente em zonas em que a água contenha altos teores de minerais. O uso regular de PREMIX® CONCENTRADO reduz os altos custos de reparação dos instrumentais, estendendo sua vida útil.

Composição: Emulsificante não-iônico derivado dos polialquilfenoletoxilados, óleo mineral, água.

MODO DE USAR

LUBRIFICAÇÃO MANUAL:

- Diluir 8mL de Premix® Concentrado para cada Litro de água;
- Mergulhe os instrumentos previamente limpos na solução, ou banhe-os completamente com o spray;
- Movimente as articulações para melhor penetração;
- Remova os instrumentos do banho e deixe escorrer por 30 segundos;
- Envolva os Instrumentos já escorridos e esterilize;
- Usar o produto na diluição correta.

EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS:

- Coloque Premix® Concentrado diretamente no compartimento destinado aos produtos de limpeza;
- Diluir 2mL de Premix® Concentrado para cada Litro de água;
- Siga as recomendações do fabricante do equipamento.

NÃO SECAR MANUALMENTE – SOMENTE ESCORRER O EXCESSO.

NÃO ENXAGUAR. O PRODUTO DEIXA UMA PELÍCULA PROTETORA SOBRE O INSTRUMENTAL.

ATENÇÃO: Utilizado na diluição correta o produto não deixa resíduos nem aspecto gorduroso nos artigos.

Produto saneante notificado na ANVISA/MS nº 25351.227610/2005-12