

PREMIXSLIP®



**FINALIZADOR DE USO PROFISSIONAL
LUBRIFICANTE MINERAL PRONTO PARA USO**

Premix Slip® é uma emulsão lubrificante, levemente alcalina destinada a prevenção de corrosão, ferrugem, manchas e enrijecimento do instrumental cirúrgico. É um produto não oleoso, não pegajoso e sem silicone e deixa película protetora nas superfícies dos artigos.

Premix Slip® reduz o custo com a reparação e a reposição dos instrumentos.

Recomenda-se o uso rotineiro, principalmente em zonas em que a água contenha altos teores de minerais (água salobra). O uso regular de Premix Slip® reduz os altos custos de reparação dos instrumentos, estendendo a sua vida útil.

Premix Slip® apresenta:

- permeabilidade ao agente esterilizante*
- não causa sensibilização dérmica*
- não citotóxico*

MODO DE USAR

1. Agite levemente. USE SEM DILUIR
2. Mergulhe os instrumentos previamente limpos na solução ou banhe-os completamente com o spray.
3. Movimente as articulações para melhor penetração.
4. Remova os instrumentos do banho e deixe escorrer por 30 segundos.
5. Envolva os instrumentos já escorridos e esterilize.
NÃO ENXAGUE.

CLASSE DE RISCO I

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO PELA ANVISA/MS

Nº 25025.009547/2003-74

*Característica comprovada por laboratório Internacional certificado ISO/IEC 17025:2005.