

# Premix<sup>®</sup> SLIP

- PERMEÁVEL AO CALOR DA AUTOCLAVE
- NÃO OLEOSO
- NÃO CONTÉM SILICONE
- DEIXA PELÍCULA PROTETORA NAS SUPERFÍCIES

**Premix-SLIP** é uma mistura lubrificante não oleosa, não pegajosa e sem silicone, constituindo-se basicamente de óleos minerais neutros.

**Premix-SLIP** protege e lubrifica os instrumentos, é resistente ao calor, atóxico e completamente permeável ao vapor da autoclave e ETO, sendo o conceito mais atual em lubrificação e prevenção contra ferrugem e oxidação nos instrumentos cirúrgicos.

**Composição:** *Emulsificante não-iônico, lubrificante mineral, emulsificante neutro, água q.s.p.*

## MODO DE USAR:

- Utilizar PremixSlip em uma cuba limpa e seca, sem diluição.
- Colocar uma quantidade suficiente para cobrir os artigos
- Mergulhar totalmente o artigo, acionando as articulações existentes.

PARA UTILIZAÇÃO ANTES DA ESTERILIZAÇÃO

NÃO SECAR MANUALMENTE – SOMENTE ESCORRER O EXCESSO

NÃO ENXAGUAR – O PRODUTO DEIXA PELÍCULA PROTETORA SOBRE O INSTRUMENTAL.

**Produto Notificado pela ANVISA/MS**