

ENDOZIME[®] XTREME POWER

DETERGENTE ENZIMÁTICO
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO
Contém 4 L

Multienzimático de Ação Universal

Para uso em lavadoras de endoscópios termodesinfectoras,
lavadoras ultrassônicas e limpeza manual.

Fórmula não espumante

Remove todos os contaminantes orgânicos.

Inicia a limpeza no contato.

Não Corrosivo

Compatível com todos os materiais de artigos médicos

• **Endozime[®] Xtreme Power** combina o poder de um produto super concentrado com a performance da Ruhof comprovando que a fórmula multienzimática é a última geração na limpeza de artigos médicos-odonto-hospitalares. Esta combinação única confere ao **Endozime[®] Xtreme Power** uma habilidade superior na velocidade da remoção da matéria orgânica. Intensificando com APA (Ação Proteolítica Avançada) que aumenta consideravelmente a atividade enzimática, o **Endozime[®] Xtreme Power** penetra nos locais de mais difícil acesso dos artigos (canulados ou não), degradando os contaminantes por contato. O **Endozime[®] Xtreme Power** possui enzimas altamente específicas, capazes de acelerar os processos de liquefação e solubilização, facilitando a ligação enzimática ao sítio de ação para a superior eficácia do produto.

**ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E
DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**


An ISO registered company
THE RUHOF CORPORATION ISO MED 2003:01
393 SAGAMORE AVENUE, MINEOLA, NY 11501-1977
1-800-537-8463 • (516) 294-5888 • Fax (516) 248-6456
www.ruhof.com • ruhof@ruhof.com

Importador exclusivo para o Brasil

Av. João Eustáquio Filho, 375 - Porto Alegre/RS - Brasil
CEP 91140-450 - Fone/Fax.: 51 3358 6300
planitrade@planitrade.com.br
www.planitrade.com.br
Aut. Func. ANVISA nº 3.01381-8
CNPJ. 90.690.097/0001-30

INTRUÇÕES DE USO

PROCESSO MANUAL

1. Diluir 1 mL de **Endozime[®] Xtreme Power** para cada litro de água a temperatura de 30°C a 45°C*.
2. Submergir os artigos a serem limpos na solução. Injetar a solução nos lumens de artigos canulados com o auxílio de pistola ou seringa ("flushing") antes da completa imersão.
3. Mergulhar os artigos durante 3 minutos para remoção da matéria orgânica.
4. Enxaguar abundantemente com água.

PROCESSO AUTOMÁTICO

1. Diluir 1 mL de **Endozime[®] Xtreme Power** para cada litro de água a temperatura de 35°C a 50°C.
2. Siga as recomendações do fabricante do equipamento.

* Para uso com água na temperatura ambiente, o serviço de saúde deverá validar o processo.

** Recomendações quanto à qualidade da água:

pH 6,0 - 9,5 / Dureza: máximo 400 mg/L CaCO₃ / Condutividade: máximo 900 uS/cm

COMPOSIÇÃO:

Alcool isopropílico, Enzima do grupo das Amilases, Carbohidrase, Lipases, Protease, Tensoativo, Alcool Etoxilado (2%p/p), Corante, Fragância e Água.

UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS O PREPARO
A REUTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA
PODE PROVOCAR PERDA DA EFICIÊNCIA .

- Atividade Proteolítica mínima: 0,02 UP .mL⁻¹ .min⁻¹
- Atividade Amilolítica mínima: 0,03 UA .mL⁻¹ .min⁻¹
- pH produto puro: 6,0 - 8,0

- NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS
- MANTENHA O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL
- NÃO REUTILIZE AS EMBALAGENS VAZIAS

PRECAUÇÃO:

Não Ingerir.

Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos ou com a pele.

PRIMEIROS SOCORROS:

- Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave imediatamente com água em abundância.
- Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

CIT (Centro de Informações Toxicológicas) Fone: 0800 721 3000 ou (51) 2139.9200
SAC (Serviço de atendimento ao consumidor): (51) 33586300

Número do Registro do Produto junto à ANVISA/MS: 3.1381.0011



Lote nº
Data de Fabricação:
Validade: 24 meses, a partir da data de fabricação.

PRODUTO DE ORIGEM NORTE AMERICANA MINEOLA - NY - EUA