

F*A*C*T*S®

**SISTEMA DE TRATAMENTO DE AUTOCLAVE
PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO
DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO
ASSISTÊNCIA A SAÚDE**

Contém 500ml

F*A*C*T*S® remove toda ferrugem, manchas, corrosões e placas de depósitos alcalinos minerais das superfícies externas e internas de autoclave e de qualquer utensílio em AÇO INOX. É uma solução segura, eficiente e rápida em espuma, permanecendo mais tempo no local onde foi aplicado.

F*A*C*T*S® requer enxague simples e não deixa resíduos.

F*A*C*T*S® pode ser usado para qualquer utensílio em AÇO INOX.

Atenção: F*A*C*T*S® é uma solução ácida prejudicial se ingerida ou respingada sobre os olhos.

NÃO USE EM INSTRUMENTOS CROMADOS OU DE PRATA
Não ingerir. Evitar a inalação ou aspiração, contato com olhos ou pele.

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E
DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO**

CLASSE DE RISCO I

**PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO PELA ANVISA/MS
Nº 25351.177572/2006-21**

RESPONSÁVEL TÉCNICA: CLAUDIA DENTEE CRF/RS 9956



CIT (Centro de Informações Toxicológicas)
Fone: 0800 721 3000 ou (51) 2139.9200



THE RUHOF CORPORATION / BIO-MED DIVISION
393 SAGAMORE AVENUE, MINEOLA, NY 11501
1-800-537-6463 • (516) 294-9288 • Fax (516) 248-6456
WEB SITE: www.ruhof.com • E-MAIL: ruhof@ruhof.com



Av. João Elustondo Filho, 375 - Porto Alegre/RS - Brasil
CEP 91140-450 - Fone/Fax: 51 3358.6300
planitrade@planitrade.com.br

Aut. Func. ANVISA nº 3.01381-8 - CNPJ. 90050097/0001-30

MODO DE USAR PARA LIMPEZA:

1. As superfícies da autoclave devem estar frias.
2. Aplique F*A*C*T*S® generosamente sobre as superfícies internas.
3. Mantenha as superfícies umedecidas com o produto durante 15 - 30 minutos.
4. Com uma escova não metálica vá escovando as superfícies, para agilizar o processo. Use luvas.
5. Enxágue as superfícies.

MODO DE USAR PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS EM AÇO INOX:

1. Aplique F*A*C*T*S® generosamente sobre as superfícies em AÇO INOX.
2. Deixe agir por 15 - 30 minutos.
3. Escove com escova não metálica para agilizar o processo.
USE LUVAS.
4. Enxágue com grande quantidade de água corrente. Repita o processo sempre que achar necessário. O uso regular de F*A*C*T*S® prolonga a vida útil das autoclaves e todos os equipamentos em AÇO INOX.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Estocar o produto em local fresco e seco, longe de substâncias alcalinas.

COMPOSIÇÃO: Ácido Fosfórico, Detergente Polialquiletoxilado, Corante, Água.

ATENÇÃO

1. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente.
2. Mantenha o produto em sua embalagem original.
3. Não reutilize as embalagens vazias.
4. Use sempre luvas e EPI para manipular o produto.
5. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicações ou Serviços de Saúde mais próximos. Sempre que possível leve o rótulo do produto.
6. Evitar o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar o produto, lave e seque as mãos. Não Inalar. Impedir o contato com os olhos, pele e roupas durante a manipulação. Não misturar com água na embalagem original.

Lote nº

Data de Fabricação:

Validade: 36 meses, a partir da data de fabricação

PRODUTO DE ORIGEM NORTE AMERICANA MINEOLA NY EUA

