

# PREMIX<sup>®</sup> CONCENTRADO

**Finalizador de Uso Profissional**  
**PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL**  
**PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO**  
**ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

**Contém 4L**

**Premix<sup>®</sup> Concentrado** é uma emulsão lubrificante inibidora de corrosão, levemente alcalina destinada a prevenção de ferrugem, manchas e enrijecimento do instrumental cirúrgico. É um produto não oleoso, não pegajoso e sem silicone.

**Premix<sup>®</sup> Concentrado** reduz o custo com a reparação e a reposição dos instrumentos. Recomenda-se o uso rotineiro, principalmente em zonas em que a água contenha altos teores de minerais (água salobra). O uso regular de **Premix<sup>®</sup> Concentrado** reduz os altos custos de reparação dos instrumentos, estendendo sua vida útil.

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**  
**E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**  
**ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO.**



**THE RUHOF CORPORATION** / BIO-MED DIVISION  
30 SAGAMORE AVENUE, MINNEOLA, NY 11901  
T: (800) 527-6463 • (516) 294-9288 • Fax: (516) 294-6456  
WEB SITE: www.ruhof.com • E-MAIL: ruho@ruhof.com

Importador exclusivo para o Brasil

**PLANITrade**

Av. João Elustondo Filho, 375 - Porto Alegre/RS - Brasil - CEP 91140-450  
Fone/Fax.: 51 3358.6300 - planitrade@planitrade.com.br  
Aut. Func. ANVISA nº 3.01381-8 - CNPJ. 90050097/0001-30

## MODO DE USAR

### Uso Manual:

- Diluir 8mL de Premix concentrado para cada Litro de água;
- Mergulhe os instrumentos previamente limpos na solução, ou banhe-os completamente com o spray;
- Movimente as articulações para melhor penetração;
- Remova os instrumentos do banho e deixe escorrer por 30 segundos ;
- Envolva os instrumentos já escorridos e esterilize;
- Usar o produto na diluição correta.

### Equipamentos Automáticos:

- Coloque Premix concentrado diretamente no compartimento destinado aos produtos de limpeza;
- Diluir 2mL de Premix concentrado para cada Litro de água;
- Siga as recomendações do fabricante do equipamento.

### NÃO ENXAGUE.


**ATENÇÃO: Utilizado na diluição correta o produto não deixa resíduos nem aspecto gorduroso nos artigos.**

### PRECAUÇÃO:

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos ou com a pele.

### PRIMEIROS SOCORROS:

- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar de imediato o centro de intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo.
  - Evitar o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos.
  - Não misturar com outros produtos. Mantenha o produto em sua embalagem original, não reutilize as embalagens vazias.
- Composição:** Emulsificante não-iônico nonilfenoletoxilado, Óleo mineral e Água.
- Cuidados de Conservação:** Estocar o produto em local seco e fresco.

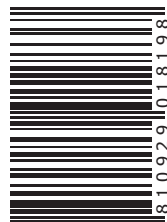

Lote nº

Data de Fabricação:

Validade: 36 meses, a partir da data de fabricação.

CLASSE DE RISCO I  
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA  
ANVISA Nº 25351.227610/2005-12  
RESPONSÁVEL TÉCNICA:  
CLAUDIA DENTEE - CRFRS 9956



CIT (Centro de Informações Toxicológicas)  
Fone: 0800 721 3000 ou (51) 2139.9200

PRODUTO DE ORIGEM NORTE AMERICANA MINEOLA NY EUA