

Novo Aplicador
Spray Formador
de Espuma

Multienzimático com Spray Formador de Espuma

PREPZYME®

Previne a adesão de matéria orgânica
na superfície de instrumentais cirúrgicos

- Mantém a matéria orgânica umedecida nos instrumentais
- Elimina a matéria orgânica ressecada
- Não causa respingos de contaminantes e evita o derramamento durante o transporte

pH NEUTRO

**DETERGENTE ENZIMÁTICO
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO**

Importador exclusivo para o Brasil

PLANitrade

Av. João Elustondo Filho, 375 - Porto Alegre/RS - Brasil - CEP 91140-450
Fone/Fax.: 51 3358.6300 - planitrade@planitrade.com.br
www.planitrade.com.br
Aut. Func. ANVISA nº 3.01381-0 - CNPJ: 00050097/0001-30

CE RUHOF

THE EXPERTS IN A BOTTLE
An ISO registered company
THE RUHOF CORPORATION / BIO-MED DIVISION
393 SAGAMORE AVENUE, MINNEOLA, NY 13697
1-800-537-8463 - (516) 294-8888 - Fax (516) 294-6456
WEB SITE: www.ruhof.com - E-MAIL: ruhof@ruhof.com

**ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Contém 650mL

Prepzyme® mantém a matéria orgânica úmida nos instrumentais e fibroscópios, prevenindo a adesão da matéria orgânica, quebrando sangue, gordura, proteínas e carboidratos antes da descontaminação. Para uso em instrumentais cirúrgicos hospitalares e odontológicos, endoscópios e outros locais onde os instrumentais necessitam de descontaminação.

INDICAÇÕES DE USO:

1. Aplicar o produto diretamente nos instrumentais e fibras ópticas contaminadas imediatamente após o uso.
2. Deixar os instrumentais mergulhados na espuma até que possam ser limpos. Aplicar mais produto se necessário para mantê-los úmidos.
3. Enxaguar os instrumentais antes do processo de descontaminação.

A REUTILIZAÇÃO DO PRODUTO
PODE PROVOCAR PERDA DA EFICIÊNCIA .

PRODUTO PRONTO PARA USO

COMPOSIÇÃO:

Álcool isopropílico, Enzima do grupo das Amilases, Proteases e Carbohidrases, Tensoativo nonilfenol polietanol (2%p/p) e Água.

- Atividade Proteolítica mínima: 0,04 UP.mL⁻¹ .min⁻¹
 - Atividade Amilolítica mínima: 0,03 UA.mL⁻¹ .min⁻¹
- pH produto puro: 6,0 - 8,0

Lote nº

Data de Fabricação:

Validade: 24 meses, a partir da data de fabricação.

- NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS ORIGINAL

- NÃO REUTILIZE AS EMBALAGENS VAZIAS

PRECAUÇÃO:

- Não Ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos ou com a pele.

PRIMEIROS SOCORROS:

- Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave imediatamente com água em abundância.
- Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.



018109294016293

CIT (Centro de Informações Toxicológicas)
Fone: 0800 721 3000 ou (51) 2139.9200
SAC (Serviço de atendimento ao consumidor): (51) 33586300

Número do Registro do Produto
junto à ANVISA/MS: 3.1381.0012.001-6