

SURGISTAIN®



DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO

REMOVE COM SEGURANÇA E RAPIDEZ FERRUGEM E CORROSÃO DE INSTRUMENTOS EM AÇO INOX

Surgistain® é uma solução ácida, usada na remoção de manchas e oxidações de instrumental cirúrgico inoxidável. Libera articulações e recupera instrumentais em aço inox. Manutenção de modo eficiente e simplificado, reduzindo os custos com reparo e reposição.

Recomenda-se um programa de rotina inicial, aplicando Surgistain® duas (2) vezes por semana durante um mês para resgatar o estado padrão dos instrumentos e um regime de aplicação quinzenal preventivo e conservador.

O uso regular de Surgistain® estenderá em muitas vezes a vida útil de quaisquer outros utensílios em aço inoxidável. Surgistain® é totalmente removido por enxágue simples.

ATENÇÃO: NÃO USE EM INSTRUMENTOS CROMADOS OU PRATA
(Exemplos: retratores maleáveis, sondas uterinas, saca-bocados maleáveis de vesícula e dilatadores).

MODO DE USAR

1. Misture uma (1) parte de Surgistain® com seis (6) partes de água quente (80°C).
2. Mergulhe os instrumentos previamente limpos dentro da solução e deixe agir por 10 a 15 minutos em imersão completa.
3. Acione os instrumentos articulados dentro da solução, para melhor penetração do produto.
4. Exponha as articulações dos instrumentos abrindo-os totalmente.
5. Escove as manchas em intervalos regulares para ir desprendendo as placas minerais (use escova não metálica de cerdas duras).
6. Enxágue abundantemente com água.

COMPOSIÇÃO: Ácido fosfórico, Dipropilenoglicolmetiléter, Detergente não iônico derivado dos polialquilenoxilados, Água.

CLASSE DE RISCO I

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO PELA ANVISA/MS

Nº 25351.410324/2005-16