

SurgiStain

Removedor oxidação
para instrumental.

- LIBERA ARTICULAÇÕES
- RECUPERA INSTRUMENTAIS EM AÇO INOX
- ELIMINA MANCHAS DE OXIDAÇÃO E PLACAS MINERAIS

Surgi-Stain é uma solução revitalizadora, segura e rápida, de uso corretivo. Empregado para remover ferrugem, crostas, manchas e oxidação de instrumental cirúrgico em aço inox, inclusive delicados instrumentos oftálmicos.

Com uma aplicação de 10 a 15 minutos, **Surgi-Stain** libera articulações, mecanismos de engate trancados, elimina manchas de oxidação e placas minerais.

Surgi-Stain resgata o estado padrão dos instrumentos, deixando-os com aparência de novos. **Surgi-Stain** faz a manutenção de modo eficiente e simplificado, reduzindo os custos com reparo e reposição. **Surgi-Stain** é ao mesmo tempo preventivo e conservador.

Composição: Ácido fosfórico, detergente não-iônico, propilenoglicol, água q.s.p.

MODO DE USAR:

- Preparar solução usando 1 parte de Surgi-Stain para 6 partes de água quente (60° a 80° C).
- Mergulhar os instrumentos por 10 a 15 minutos, expondo suas zonas críticas.
- Usar escova não metálica e enxaguar.

Produto Notificado pela ANVISA/MS