



INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

Procedimento de descontaminação de instrumentos canulados utilizando soluções enzimáticas.

As instruções para a limpeza destes instrumentais incluem os seguintes passos, sempre utilizando EPI adequado.

1. Colocar o instrumental em água corrente (preferencialmente morna) ou pistola de água para remover o excesso de sujeira, **imediatamente** após o procedimento.
2. Preparar uma cuba com solução enzimática (recomendamos **ENDOZIME AW Plus APA** da Ruhof) seguindo as instruções de uso contida no rótulo do fabricante.
3. Fazer *flushs* com seringa de solução enzimática (**ENDOZIME AW Plus APA**) no tubo, certificando-se que todo o canal foi preenchido com a solução.
4. Após o procedimento acima, deixar o instrumental submerso por 3 minutos na solução enzimática.
5. Fazer a limpeza interna do tubo com esponja especial embebida de solução enzimática (**INSTRUSPONGE** da Ruhof). Para isto é necessário escolher o diâmetro da esponja e o comprimento adequado de acordo com o lúmen a ser limpo.
6. Mergulhar a ponta esponjosa do dispositivo (**INSTRUSPONGE**) na água ou na própria solução enzimática para ativar as enzimas.
7. Inserir a esponja na parte interna da cânula, percorrendo toda a sua extensão, esfregando para remover os resíduos de matéria orgânica das paredes internas e retirando pela outra extremidade, se possível. Movimentos para frente e para trás ajudarão a deslocar os resíduos sem danificar o instrumental.
8. Após cada passagem, enxaguar a esponja para remover qualquer resíduo visível antes de inseri-la novamente.
9. Repetir este processo até que não haja mais resíduos visíveis na esponja (**INSTRUSPONGE**).
10. Enxaguar abundantemente o instrumental com água corrente de boa qualidade (se possível bi-destilada). Neste momento verificar a eficácia da limpeza.
11. Para uma complementação da limpeza, pode-se nesta fase colocar as cânulas na lavadora ultrassônica, de acordo com as instruções do fabricante.
12. Secar muito bem. Pode ser usado ar comprimido hospitalar para este procedimento.
13. Embalar para a esterilização, conforme normas do Ministério da Saúde.

Para maiores informações ligue: **Richter Ltda:** 11 3908-7000 ou consulte o site www.planitrade.com.br (importador exclusivo dos produtos Ruhof para o Brasil)